



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 3010181040000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Столы массажные переносные и стационарные с принадлежностями **СТУЛ МАССАЖИСТА***

производства ХУАНШАН ДЖИНФУ ВУД ТРАЙДИНГ КО., ЛТД, КНР
Huangshan Jinfu Wood Trading Co., Ltd., 17, Qiliting, Qimen, Huangshan, Anhui, China

*является принадлежностью массажного стола и поставляется опционально

Номер партии 032018060301-12/17

Массажные столы переносные и стационарные предназначены для различных видов массажа и лечебных процедур.

Принадлежности предназначены для облегчения работы массажиста и усиления эффективности массажных процедур.

У стула предусмотрена возможность регулировки по высоте, возможность для передвижения или стационарного расположения на полу, возможность опирания для ног в сидячем состоянии. Имеется рычаг управления установки высоты стула. Стул состоит из пятилучевого основания, расположенного на пяти колесиках, газовой пружины, сиденья, специальной спинки и подставки для ног (в зависимости от модели стула). Верхняя часть газовой пружины введена в консоль сиденья, на которой закреплено сиденье. Нижняя часть газовой пружины закреплена в пятиконсольном основании.

Специальная конструкция стула обеспечивает максимальную подвижность. Форма спинки и сидения анатомически корректны для человека любого роста и веса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Не следует использовать стул в местах с высокой влажностью.
2. Не следует использовать стул на открытом воздухе, избегайте мест с прямыми солнечными лучами.
3. Будьте осторожны при использовании острых предметов или инструментов, так как они могут проколоть покрытие. Держите стул вдалеке от острых предметов.
4. Убедитесь в том, что стул располагается на плоской и ровной поверхности.
5. Не допускайте перегрузки стула при использовании.
6. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют со стулом.



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

Сборка



Комплектация:

1. Спинка-подлокотник
2. Сиденье
3. Газ-лифт
4. Крестовина с колесами

- I. Достаньте все части стула из коробки и разложите их на полу.
- II. Установите колеса на крестовину (4), и убедитесь, что все колеса хорошо закреплены.
- III. Вставьте газ-лифт (3) в отверстие крестовины (4).
- IV. Наденьте сиденье со спинкой-подлокотником (1,2) на газ-лифт (3).
- V. Сядьте на стул и отрегулируйте высоту, чтобы вам было комфортно пользоваться стулом.



Комплектация:

1. Сиденье
2. Газ-лифт
3. Крестовина с колесами

- I. Достаньте все части стула из коробки и разложите их на полу.
- II. Установите колеса на крестовину (3), и убедитесь, что все колеса хорошо закреплены.
- III. Вставьте газ-лифт (2) в отверстие подставки для ног (кольца) и соедините с крестовиной (3).
- IV. Наденьте сиденье (1) на газ-лифт (2).
- V. Сядьте на стул и отрегулируйте высоту, чтобы вам было комфортно пользоваться стулом.



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 30101810400000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул Модель	Высота сидения, см	Ширина сидения, см	Глубина сидения, см	Диаметр основания, см	Диаметр подставки- кольца, см	Вес изделия, кг	Нагрузка, кг
МА03 СТ-1КР	51-69	39	41.5	56	28	10.34	100
МА03 СТ-2КР	51-69	39	41.5	56	28	10.3	100
МА03 СТ-3КР	51-69	45	48	64	32	13.14	100
МА02 СТ-4КР	44-58	31	35	44	22	7.02	100
МА01 СТ-5КР	44-58	32	32	44	22	5	100
МА02 СТ-6КР	45-59	23	34	44	22	5.96	100
МА01 СТ-7КР	46-66	35	42	56	28	7.1	100
МА02 СТ-8Р	43-58	36	36	56	-	7.34	100
МА02 СТ-9Р	43-58	41	45	56	-	9.76	100
МА01 СТ-10КР	43-58	33	33	44	22	3.02	100
МА02 СТ-11Р	40-43.5	40	43.5	56	-	9.6	100
МА02 СТ-12Р	45-57	41	45	56	-	10.63	100
МА02 СТ-13Р	45-57	41	45	56	-	10.26	100
МА02 СТ-14КР	48-60	36	36	56	22	10.63	100
МА02 СТ-15Р	43-58	40	44	56	-	10.24	100

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Транспортировка и хранение

После упаковки стул доступен для общей транспортировки. Упаковка должна защищать стул от интенсивного воздействия, вибрации и сдавливания, а также от проникновения влаги во время транспортировки. После упаковки стул должен храниться в вентилируемом помещении с влагопоглотителем без агрессивных газов.

Условия использования: температура 10°C-40°C, относительная влажность 30–85%



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810400000012277 в ПАО "Промсвязьбанк"
г. Москва, к/с: 3010181040000000555 БИК 044525555
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail:info@med-mos.ru

Уход

Используйте обычные моющие средства для очистки пятен на стуле. Не сушить стул феном для волос.

Не используйте чистящие и абразивные чистящие средства, как спирт, бензин и так далее, для очистки стула.

*Поставляется опционально в комплекте с массажными столами:

FIX-1A	Стол массажный стационарный
FIX-1B	Стол массажный стационарный
FIX-2A	Стол массажный стационарный
FIX-MT1	Стол массажный стационарный
FIX-MT2	Стол массажный стационарный
FIX-0A	Стол массажный стационарный
FIX-0B	Стол массажный стационарный
JF-AY01	Стол массажный переносной с деревянной рамой
JFAL01A	Стол массажный переносной с алюминиевой рамой
JFAL03	Стол массажный переносной с алюминиевой рамой
JFAL01-F	Стол массажный переносной с алюминиевой рамой

****Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение - быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом изделии.

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 5042651

Дата продажи: « » 20 г.

Генеральный директор
В.В. Катая

ООО «Медтехника Москва»